

Procedura SPEDIZIONE DEL CAMPIONE e MODALITA' DI PAGAMENTO:

- 1 - Inserire nella scatola i 2 tamponi, il presente modulo compilato in tutte le sue parti e con doppia firma, la ricevuta del pagamento e la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità.
- 2 - Inserire la scatola in una busta da spedizione attaccando l'etichetta fornita con l'indirizzo del DESTINATARIO (BIOLAB SRL Largo degli aranci 9 - 63100 Ascoli Piceno)
- 3 - Contattare il corriere GLS alla mail **ap@gls-italy.com** o al telefono **0735.704327** scrivendo nel testo della mail o comunicando a voce il seguente messaggio:

"Buongiorno, vorrei prenotare un ritiro in PORTO ASSEGNATO(AP-BIOLAB 2828) per il giorno XX-XX-XXXX nella fascia oraria dalle --:-- alle --:-- al seguente indirizzo: Sig. xxxxx xxxxx, VIA xxxxxxxxx N. xx, CAP xxxxx LOCALITA' xxxxxxxx. Per qualsiasi esigenza potete contattarmi al cell. xxxxxxxxxxxx. Attendo una vostra gentile conferma di ritiro. Cordiali saluti. Sig. xxxxxxxxxxxx"

Il costo della spedizione è compreso nel pagamento del servizio. Il cliente NON deve versare altri emolumenti al corriere.

ATTENZIONE: Conservare i campioni a temperatura ambiente e spedirli al massimo entro 4 giorni dal prelievo.

MODALITA' DI PAGAMENTO: utilizzare il bollettino postale allegato scrivendo l'importo relativo al test richiesto ed allegare la ricevuta nella busta di spedizione. Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, utilizzare le seguenti coordinate ed allegare la ricevuta del bonifico nella busta di spedizione:

INTESTAZIONE: BIOLAB SRL **CAUSALE:** TEST TROMBOFILIA (base o plus o estensione)
IBAN: IT19S0326813500052297845290 **BANCA:** Banca Sella filiale di Ascoli Piceno

BIOLAB srl

Ascoli Piceno, Largo degli Aranci n.9
 www.laboratoriobiolab.it

☎ 0736 550452 ✉ servizi@laboratoriobiolab.it

Azienda con Sistema di Gestione Certificato ISO 9001:2008
Laboratorio Accreditato Livello Eccellenza SSR



Modulo accettazione (da rispedire insieme al campione)

Data Prelievo ____/____/____

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE (dati del paziente)

Nome _____ Cognome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____

Indirizzo di residenza _____ n° _____

Cap _____ Città _____

Cell _____ email (**obbligatoria per invio referti e fattura**) _____

obbligatorio per fatturazione

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spazio per il laboratorio

TEST RICHIESTI:

- ANTIGEN 130
- ANTIGEN 60
- ANTIGEN VEG

Modulo accettazione campioni e Modo d'uso



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- n. 1 Carta per la raccolta di sangue capillare
- n. 2 Pungidito (1 + 1 di riserva)
- n. 1 Salvietta disinfettante
- n. 1 Cerotto

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.


Una volta eseguito il prelievo il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

PRECAUZIONI PER L'UTENTE

- I campioni di sangue umano (inclusi i campioni dei pazienti) devono essere considerati come potenzialmente infetti.
- Occorre prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione dei componenti del kit.
- Non mescolare componenti di kit diversi con differenti numeri di lotto.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.


PROCEDURA DI RACCOLTA DEL CAMPIONE PER IL TEST ANTIGEN

1. Disinfettare la punta del dito scelto per il prelievo con la salvietta disinfettante fornita.
2. Rimuovere la linguetta di protezione dalla lancetta pungidito.

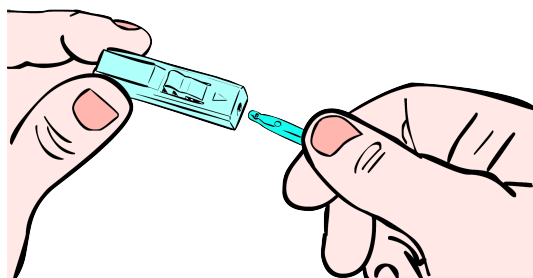


3. Prima di eseguire la puntura, **massaggiare vigorosamente la punta del dito tenendo la mano con le dita rivolte verso il basso**. Per facilitare la fuoriuscita del sangue, può essere utile coprire per 3-4 minuti la parte interessata con un panno caldo al fine di riscaldare il sito di puntura. In alternativa è possibile lavare la parte interessata con acqua calda per almeno 2 minuti.

4. Posizionare la lancetta pungidito e pungere la pelle premendo **energeticamente** il bottone della lancetta pungidito (come da immagine).

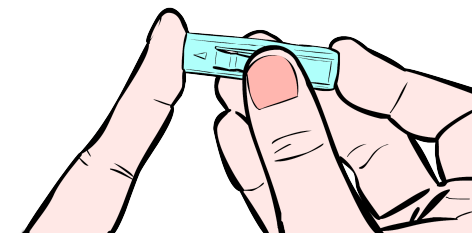

5. Avvicinare la parte del dito da cui fuoriesce il sangue alla carta assorbente facendo assorbire il sangue all'interno dell'area delimitata dal cerchio.

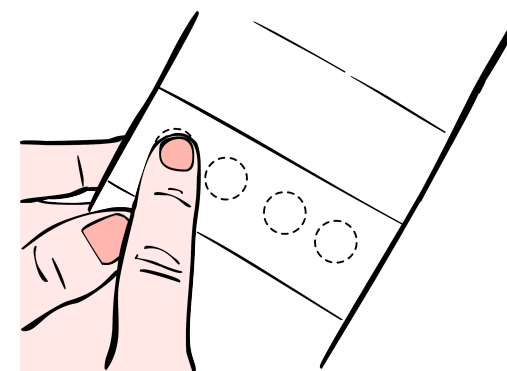

6. Far assorbire il sangue su tutti i cerchi disegnati sulla carta.

